

# BNG® COVID-19 Antijen Hızlı Test Kaseti

(Tükürük)

Hızlı Referans Rehberi

## NOT:

Her test tek kullanımlıktır. Testi birden fazla kullanmayı denemeyiniz.


## TEST PROSEDÜRÜ




1) Kutunun içerisinde bulunan test kasetini, tükürük toplama aparatını ve mavi kapaklı ekstraksiyon solusyonunu çıkarınız.




2) Eldivenleri giyiniz. Her hasta için yeni bir eldiven kullanınız.

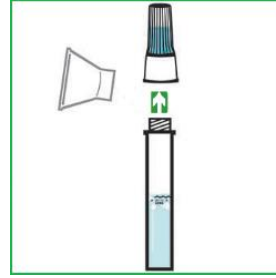


3) Ekstraksiyon solüsyonu bulunan mavi tüpün kapağını açınız ve tükürük toplama aparatını yerleştiriniz.

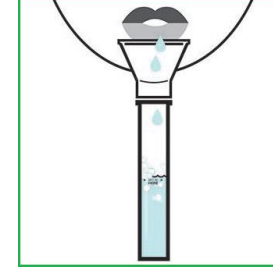

4) Tüpün üzerindeki şeffaf çizgiyi geçmeyecek şekilde tükürünüz.

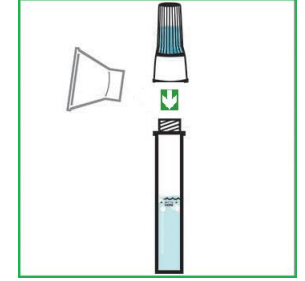

5) Tükürük toplama aparatını çıkarınız ve ekstraksiyon tüpünün kapağını kapatınız.

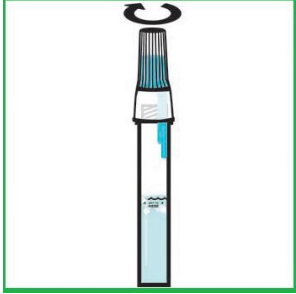


6) Tükürük ve ekstraksiyon tamponunu karıştırmak için tüpü üç defadan fazla sallayınız.




7) Mavi kapağın üst kısmındaki yeşil daire içerisinde gösterilmiş olan çıkıntıyı koparınız.




8) Test kasetinin örnek kuyusuna (S) 3 damla damlatınız. 15 dakika sonra sonucu okuyunuz. Sonucu 30 dakikadan sonra yorumlamayınız.

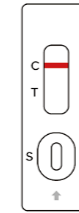

Negative

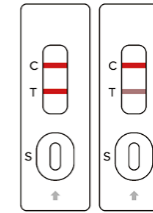

Positive

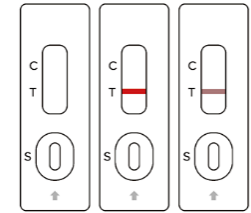

Invalid

**Pozitif:** İki çizgi belirlenmelidir. Renkli çizgilerden biri kontrol çizgisi bölgesinde (C) olmalı ve diğer çizgi test bölgesinde (T) olmalıdır.

**Negatif:** Sadece kontrol bölgesinde (C) tek bir renkli çizgi olmalıdır. (T) bölgesinde herhangi bir çizgi görülmemelidir.

**Geçersiz:** Kontrol çizgisi (C) görülmez ise test geçersizdir.

**NOT:** 4. Adımı uygulamadan önce en iyi sonuçları almak için lütfen 30 dakika içinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, vape yapmayın veya dişlerinizi fırçalamayın. Örnekleri toplamadan 2 saat önce gargara kullanmayın.

**ÖRNEK HASSASİYETİNİ ARTTIRMAK İÇİN BURUNDAN 5 CM DERİNLİĞİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE NAZAL ÖRNEK ALINARAK TÜKÜRÜK SONRASI EKSTRAKSİYON SOLÜSYONA KARIŞTIRINIZ.**