

NOT:

Her test tek kullanımlıktır. Testi birden fazla kullanmayı denemeyiniz.

Hızlı Referans Rehberi

BNG® COVID-19 Antikor Hızlı Test Kaseti


Test Prosedürü




1) Kutunun içerisinde bulunan test kasetini, temizleme mendilini, iğneyi ve solusyonu çıkarınız.




2) Eldivenleri giyiniz. Her hasta için yeni bir eldiven kullanınız.

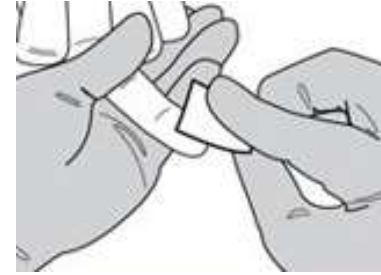

3) Temizleme mendili ile kan alınan parmağınızı siliniz.

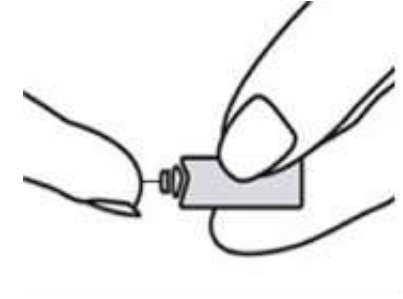


4) Steril tek kullanımlık mavi renkte iğnenin kapağını çevirerek açınız ve parmak ucunu deliniz.

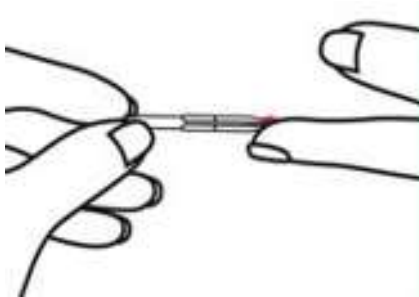

5) Mikropipet ile yaklaşık 10 µL kan örneği alınır.



7) Kan örneğini test kasetinin örnek kuyusuna (S) aktarınız. **ÜZERİNE TAMPON SOLÜSYONUNDAN 3 DAMLA DAMLATINIZ.** 15 dakika bekleyiniz. Sonuçları 30 dakikadan sonra yorumlamayınız.

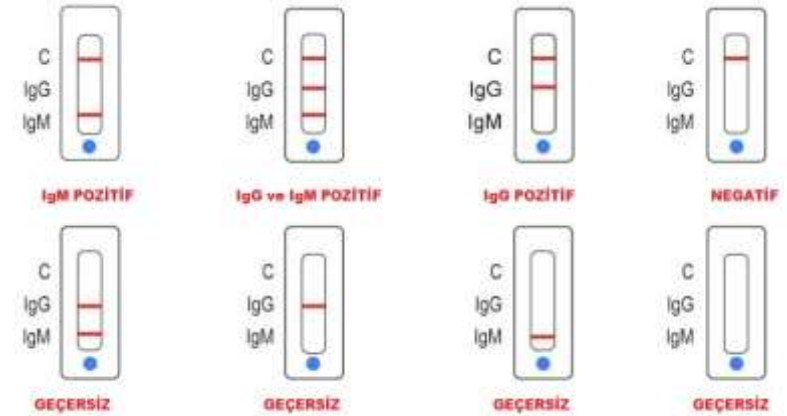

NOT: Sonuçların IgM Pozitif, IgG Pozitif veya IgM ve IgG Pozitif olması kişilerde antikor bulunduğunu göstermektedir.